

# Arpalit<sup>®</sup> neo

Milí partneři a zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o správné aktivaci a použití elektronického repelentu **ARPALIT DOG**. Zákazník má k dispozici návod, který je součástí obalu každého produktu včetně grafického znázornění ověření funkčnosti elektronického repelentu Arpalit Dog.

V sekci „**Způsob použití**“ je uvedeno jakým způsobem lze správně provést zkoušku kontroly funkčnosti. Kontrolu není nutné vykonávat ihned a pravidelně. Kontrola je opodstatněná jen v případě, že máte podezření, že zařízení není funkční. Pro kontrolu funkce použijte tenký hrot (např. špendlík nebo kancelářskou sponku), který vložíte do malého kulatého otvoru umístěného v přední levé horní části od středového vysílače s mřížkou, který obsahuje mikročip.

Po stisknutí kontrolního plíšku uvnitř zařízení, přiložte elektronický repelent k uchu. Pokud uslyšíte slabé zvuky připomínající tikot hodinek, máte ověřeno, že elektronický repelent je stále funkční.

Vyvarujte se, abyste hrot nevložíli do vysílače s mikročipem, který je v přední části krytý mřížkou, odkud se vydávají ultrazvukové vlny. V tomto případě by mohlo dojít k nenávratnému poškození elektronického repelentu.

Elektronickému repelentu nevádí vlhko ani déšť. Před koupáním v řece či rybníku, se doporučuje obojek s elektronickým repelentem zvířeti sundat, aby nedošlo k poškození elektronického repelentu.

V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

obchodní oddělení  
AVEFLOR a. s.


obchod@aveflor.cz



[www.arpalit.cz](http://www.arpalit.cz)

# Arpalit® Dog


1. odstraňte pojistku

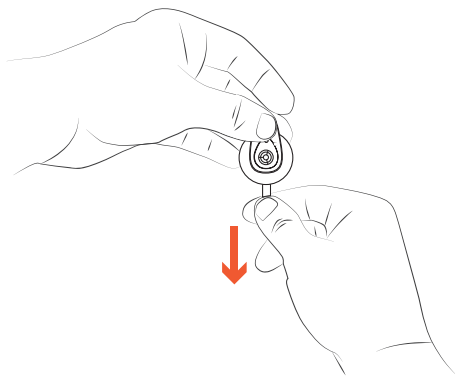

2. po zablikání LED diody se zařízení aktivuje



3. repelent zavěste na obojek zvířete, aby otvor s mřížkou směřoval k tělu zvířete

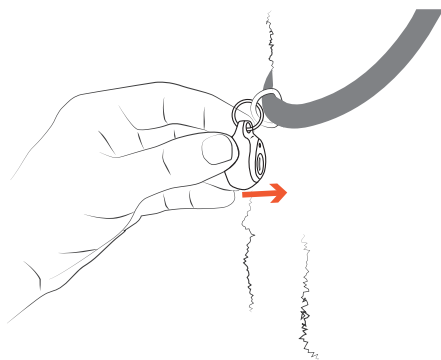

4. doba účinku je 10 měsíců

